



PROACTIV®



WHEEL-E

UNE FORCE MOTRICE ET UN CONTRÔLE MAXIMUM POUR TOUS LES TERRAINS

Le dispositif de traction **WHEEL-E** transforme ton fauteuil roulant en un compagnon puissant pour tous les trajets. Avec sa roue de 20", ses pneus larges et son centre de gravité bas, tu maîtrises sans peine les chemins stabilisés, les sentiers forestiers et les pentes. La batterie offre une autonomie de 45 km, extensible à 90 km avec une double batterie. Grâce au régulateur de vitesse et à la géométrie de direction stable, tu profites d'un maximum de confort et de sécurité. De nombreux accessoires permettent une adaptation individuelle – pour une mobilité indépendante sur tous les terrains !



#IndépendanceEnRoute

D'un seul geste, tu actives la poignée d'accélération et tu roules sans effort sur les trottoirs, les chemins forestiers ou les pentes grâce à la roue de 20" et aux pneus larges.



#PlusDeVitesse

Selon l'équipement, tu peux atteindre des vitesses de 6 km/h, 15 km/h (en option avec une autorisation d'exploitation individuelle) ou 24 km/h. Que ce soit en ville, en tout-terrain ou sur des chemins privés, le choix t'appartient.



#FortePente

Jusqu'à 15% de capacité de montée. Grâce au puissant entraînement par moyeu Triride, tu peux venir à bout des pentes les plus difficiles. Parfaitement combiné avec 5 niveaux d'assistance et une marche arrière pour plus de flexibilité.



#DeuxFoisPlusLoin

Court ou long trajet: jusqu'à 45 km d'autonomie avec une seule batterie. Avec la batterie double en option, tu profites du double – et le connecteur interchangeable simplifie le changement.



INDIVIDUELLEMENT ADAPTÉ À TOI.

Le **WHEEL-E** s'adapte parfaitement à tes besoins: Avec une colonne de direction réglable en longueur, en angle et en hauteur, tu trouveras la position idéale du guidon. L'adaptateur flexible est également ajustable en hauteur, en longueur et en angle – pour un maximum de confort et de contrôle.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'adaptateur central ou frontal stable se monte en un tour de main et ne laisse pratiquement pas de poids supplémentaire sur le fauteuil roulant.



Régulateur de vitesse pour une conduite détendue. Profite d'une vitesse constante en appuyant simplement sur un bouton. Pas de réglage, pas de stress – juste le plaisir de conduire.



L'individualité compte. Avec des accessoires tels que des garde-boue, des porte-bagages et des rétroviseurs, le WHEEL-E s'adapte à tes besoins – même pour les utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles.



150 kg sont déjà possibles en standard. Une charge remorquée allant jusqu'à 170 kg est possible après contrôle technique de l'équipement et avec un adaptateur « Heavy Duty ». Charges remorquées supérieures sur demande.





DONNÉES TECHNIQUES

Données sous réserve de modifications techniques.

Moteur :	Moteur de moyeu : Triride I max. 1000 W
Batteries :	Triride 48 V 10,5 Ah 504 Wh autonomie env. 25 - 45 km 3,3 kg
Double batterie :	Possible; commutation par le dispositif de changement de position sur l'axe de pédalier
Poids total sans adaptateur :	à partir de 14,7 kg (sans batterie)
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 150 kg de poids tracté et 10 kg de charge
Dimensions de transport :	à partir de 90-110 x 63 x 62 cm
Dimension de la roue motrice :	20"
Vitesse système d'entraînement :	6 km/h (Suisse : 10 km/h), 15 km/h (autorisé uniquement avec l'autorisation d'exploitation individuelle en Allemagne sur les zones publiques et dans la circulation), 24 km/h (autorisé uniquement sur les terrains privés en Allemagne)

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

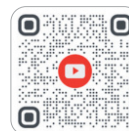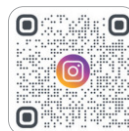

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2026_01
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.